

非塩素系

環境除菌用

希釈不要

カネパス V

(アルコール除菌剤)

高頻度に手が触れる環境表面の
細菌・真菌・ウイルスの除去



スプレー式

- ① 「▶」・・・霧状 (広角)
- ② 「×」・・・止め
- ③ 「◀」・・・霧状 (狭角)
- ④ 「×」・・・止め



500mL

梱包	500mL×10
JANコード	 4987556118013

特 徴

1. エタノール (83vol%) を含有する環境用アルコール除菌剤です。
2. 添加物としてクエン酸と硫酸亜鉛を配合することにより、ノロウイルス等のノンエンベロープウイルスを含むウイルス・一般細菌・真菌等、広範囲な微生物をすばやく除菌します。
3. 速乾性で使いやすい。
4. 環境表面に希釈することなく、そのまま使用することができます。

製造販売元

兼一薬品工業株式会社

大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

OSAKA KANEICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD JAPAN

環境除菌用

アルコール除菌剤

カネパス V

火気厳禁

第4類アルコール類
水溶性 危険等級II

使用期限：3年(ラベルに記載)

KANEPAS V

販売開始 2014年12月

品名	カネパス V
成分	エタノール (83v/v%)、精製水、イソプロパノール、グリセリン、クエン酸水和物、硫酸亜鉛水和物
用途	医療施設等の環境表面 (トイレの手すりや便座、床等)・器具・物品の除菌
使用方法	<p>① スプレーノズルの先端部を回して「◀」(霧状広角)又は「▶」(霧状狭角)を天面に合わせてください。</p> <p>② 約10cm離して対象物に直接スプレーした後、布等で拭いてください。もしくは布等にスプレーして対象物を拭いてください。なお、広範囲に噴霧しないように注意してください。</p> <p>③ 使用後はスプレーノズルの先端部を回して「X」を天面に合わせてください。</p>

スプレーノズルの先端部 天面



必ず使用前に
使用上の注意
をよくお読み
ください。

使用上の注意



- 1) 用途以外には使用しないでください。
- 2) 人体や食品に使用しないでください。
- 3) 本剤は希釈せず、原液のまま使用してください。
- 4) 引火のおそれがあるので火気の付近では使用しないでください。
- 5) スイッチ・コンセント等電気器具に直接噴霧しないでください。
- 6) 塩素系製品と混ぜると有害なガスが発生するおそれがあるので注意してください。
- 7) コンロの火や湯沸器の種火等、火元を必ず消し、換気に注意して使用してください。
- 8) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、金属製品等、材質によっては変質(変色)するおそれがあるので、注意してください。
- 9) 白地や淡い色の繊維製品や革製品、水性ワックス・ペンキ・ニス等の塗装部、アクリル製のプラスチック等に使用しないでください。
- 10) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は直ちに水またはゆるま湯で洗い流してください。
- 11) 広範囲または長時間使用しないでください。
- 12) 使用時にはゴム手袋、マスク等を着用し換気の良い場所で使用してください。
- 13) 使用中に咳き込んだり、気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止してください。
- 14) 誤って飲んだ場合は多量の水を飲ませてください。
- 15) 万一、身体に異常が起きた場合は、本品を持参し、医師に相談してください。
- 16) 容器を横倒しや逆さまにして使用しないでください。
- 17) アルコール過敏症の人、アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は、薬液との接触や蒸気を吸い込まないように注意してください。
- 18) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。また、保管の際は横倒しにしないでください。
- 19) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- 20) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 21) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

まぜるな危険

本品と塩素系製品を一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。

カネパス V の使用例

●高頻度に手が触れる環境表面の細菌・真菌・ウイルスの除菌にご使用ください。 ●希釈せずに、そのまま使えて、すばやく除菌します。


1 トイレの手すり・便座




2 廊下・壁・手すり



3 スイッチ・ドアノブ

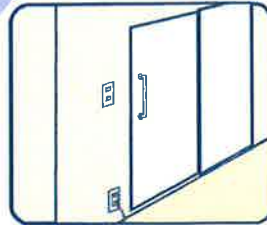

4 ベッド欄・床

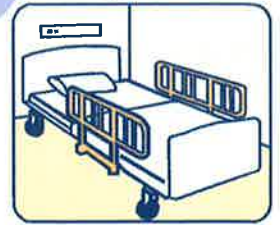

KANEICHI 製造販売元・お問合せ先

兼一薬品工業株式会社

〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

TEL 06 (6471) 3548 FAX 06 (6471) 5659

E-mail : webmaster@kaneichiyk.co.jp

HP : http://www.kaneichiyk.co.jp/